

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

IL DIODO LASER A COSTO ZERO

La tecnologia del Diodo 808 nm offre una grande opportunità commerciale per gli istituti di estetica; da sempre in tutti i centri estetici il trattamento per eccellenza più richiesto dal cliente riguarda l'eliminazione dei peli superflui.


BEAUTY SERVICE attraverso il progetto permette finalmente a tutti gli istituti (piccoli o grandi, indipendentemente dalla disponibilità ad investire, con tanti o pochi clienti) di cogliere i massimi benefici da un mercato in continua evoluzione, senza investimenti e vincoli alcuni.

Le caratteristiche tecniche del Diodo Laser 808 permettono di trattare qualsiasi fototipo e tipo di pelo in modo efficace, rapido e sicuro in tutte le stagioni.

La velocità di esecuzione del trattamento offre al consumatore un prezzo fisso a zona paragonabile al costo di una ceretta, mantenendo una redditività oraria estremamente remunerativa.

BEAUTY SERVICE attraverso un approccio scientifico al trattamento di fotoepilazione garantisce risultati visibili fin dalla prima seduta in assoluta sicurezza e senza una trattativa commerciale, in modo semplice, veloce e coinvolgente.

BEAUTY SERVICE

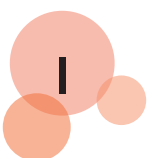

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

FINALMENTE LA FOTOEPILAZIONE LASER PER TUTTI

- Offri l'opportunità a tutti i tuoi clienti di provare l'esperienza della Fotoepilazione con il Diodo Laser

Invita tutti i tuoi clienti suggerendo un trattamento estremamente efficace, specificando che
AL COSTO DI UNA CERETTA O POCO PIÙ,

possono intraprendere un percorso di eliminazione progressiva dei peli superflui, senza dolore in modo sicuro e certificato.

- Inserisci gli appuntamenti dei clienti, inserendo all'incirca 25/30 persone utilizzando la RUOTA PREZZI, presenterai in modo chiaro ed intuitivo le varie tariffe a zona.

- Inserisci gli appuntamenti ogni 15 minuti.

Nel caso in cui il cliente volesse fare più zone o zone molto grandi calcolo circa 30 minuti di operatività. Motiva il cliente se vuole ad aumentare le zone, il costo basso del trattamento permette di poter trattare molte zone spendendo relativamente poco.

- Ricordati sempre di prendere il prossimo appuntamento al cliente.

li laser tornerà tra 30 giorni e siccome concentriamo i clienti, per non perdere il proprio orario è sempre buona prassi fissare il proprio appuntamento di volta in volta.

- Inserisci nel tuo portale Facebook e sul Sito i risultati o i commenti sui risultati ottenuti dai clienti. Inizia a comunicare con tutti i tuoi amici, ed invitali alla tua prossima data.

Segui queste poche e semplici suggerimenti e susciterai:

ENTUSIASMO

FIDELIZZAZIONE

PASSAPAROLA

SUCCESSO

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

CHE COS'È IL DIODO LASER 808?

L'epilazione con Laser a diodo è un trattamento mirato all'eliminazione dei peli superflui, che garantisce un risultato permanente. La tecnologia emette una luce rossa coerente attratta esclusivamente dal fusto del pelo, utilizzandolo come conduttore per raggiungere direttamente il bulbo, eliminando così le cellule germinali del follicolo. Durante ogni seduta avverrà una diminuzione progressiva, dall'0% al 40%, dei peli in fase di nascita: dopo circa 8 sedute dai follicoli trattati crescerà solo una leggerissima peluria necessaria a proteggere fisiologicamente la pelle. Di volta in volta la cute sarà più liscia al tatto, il Laser infatti porterà in superficie tutti i bulbi che normalmente resterebbero sotto pelle, donando quindi un colorito più uniforme e soprattutto non discromico.

• AL COSTO DI UNA CERETTA?

I tempi di esecuzione del trattamento consentono una diminuzione significativa dei costi orari rendendo il servizio accessibile a tutti.

• EFFICACIA:

Il Laser Diodo 808 nm consente una fotoepilazione permanente tramite il principio della FOTOTERMOLISI SELETTIVA andando a colpire le cellule germinali atte alla rigenerazione del bulbo pilifero. La luce coerente e selettiva con lunghezza d'onda di 808 nm è ideale per colpire il cromoforo melanina poiché viene attratta esclusivamente verso il bulbo e non si disperde. L'IPL invece avendo una luce ad ampio spettro, dai 600 ai 1200 nm (luce arancio, rosso, porpora) è soggetta a dispersione; ciò influisce sull'efficacia del trattamento determinando un rallentamento della crescita del pelo che però riprende a crescere a ritmi normali dal momento in cui non ci si sottopone più al trattamento.

• FREQUENZA:

Il trattamento va effettuato con cadenza mensile secondo le fasi di vita del pelo: anagen, telogen e catagen.

• NUMERO DI SEDUTE:

La potenza e l'efficacia del Laser permette di eseguire un minor numero di sedute, in media 10/12 su un normotipo.

• FOTOTIPI:

L' IPL emette una luce ad alta intensità che lavorando ad ampio spettro si disperde inutilmente sulla pelle.

Il Laser Diodo lavora a bassa intensità eliminando di fatto il rischio di bruciature, la frequenza di 808 nm permette inoltre alla luce rossa pura di essere assorbita 10 volte di più dalla melanina del pelo. Questa risulta essere la differenza sostanziale tra la IPL e il Diodo Laser.

LUCE PULSATA	VS	DIODO LASER 808
Max IV/V con molta cautela	FOTOTIPI	Tutti dal I al VI
Scuro, castano	COLORE PELO	Scuro, castano, biondo, rosso
Medio/alto	DOLORE	Basso
Ogni 21/30 gg	FREQUENZA	Ogni 30/40 gg
Crescita del pelo rallentata	EFFICACIA	Permanente
15/20 Mediamente	NUMERO SEDUTE	10/12 Permanente su normotipo
Media	VELOCITA' DI ESECUZIONE	Alta
No	RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI	Si
Alti	COSTI DI MANUTENZIONE	Bassi
Pacchetto/abbonamento	MODALITA' DI PAGAMENTO	No abbonamenti per cliente finale
Elevato	PREZZO SINGOLA SEDUTA	Paragonabile circa ad una ceretta
50.000 Spot 7/12	DURATA MANIPOLO	10.000.000 Spot 8/10 anni

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

LA GIORNATA LASER

PUNTO 1

Requisiti della cabina

La cabina in cui si svolge il trattamento deve essere dotata di un lettino, di un mobiletto o di un carrellino ove appoggiare il necessario e di una presa di corrente con riduzione schuko.

Per mantenere la cabina in ordine, si consiglia di servirsi di un cestino sufficientemente grande, data la notevole quantità di carta che si utilizza durante la giornata.

Sarebbe anche opportuno che non ci fossero superfici riflettenti quali specchi o quant'altro; nel caso ci fossero, meglio coprirli con un asciugamano bianco o con la carta del lettino.

PUNTO 2

Occorrente

Ai fini di un corretto svolgimento del trattamento, è necessario munirsi di:

- Gel conduttore: neutro e trasparente, non quello azzurro (contiene azulene).
- Abbassa lingua: necessari per stendere il gel sulla zona da trattare. Gettare dopo ogni singolo uso.
- Matita bianca: semplice matita da make up, serve per schermare qualsiasi anomalia della pelle.
- Cerotti bianchi e dischetti di cotone: per schermare anomalie cutanee di grandi dimensioni.
- Lamette usa e getta o abbassapeli elettrico: per abbassare quanto basta il pelo se il cliente non ha eseguito la preparazione a casa oppure per eventuali rifiniture; potrebbero risultare utili una schiuma depilatoria e del borotalco.
- Rullo adesivo per pulizia peli.
- Ciotoline: sia per contenere il gel, in modo da averlo sempre a portata, sia per l'acqua qualora si dovesse procedere a una depilazione completa della zona.
- Veline: multiuso.
- Mascherine: per effettuare il trattamento in posizione 2 (viso, baffetto etc).
- Guanti in lattice: per effettuare il trattamento in zona inguinale.
- Mutandine monouso: da donna e da uomo.
- Occhialini protettivi.
- Carta per il lettino.
- Asciugamani bianchi, varie misure.
- Crema post-epilazione: crema, NON olio.
- Spray disinfettante: amuchina, alcol o altro, per disinfettare il manipolo tra una cliente e l'altra.

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

PUNTO 3

Organizzazione della postazione di lavoro

- Posizioniamo il Laser su un lato del lettino, in modo da poter lavorare agevolmente su tutte le zone del corpo e del viso.
- Organizziamo tutto l'occorrente sul mobiletto o sul carrellino al fine di avere tutto facilmente a disposizione durante l'esecuzione del trattamento.
- Preoccuparsi di appoggiare il tutto su un foglio di carta per riuscire a mantenere la cabina più pulita e in ordine possibile.

PUNTO 4

Approccio al trattamento ed esecuzione

1) Innanzitutto facciamo accomodare il cliente (se deve indossare la mutandina monouso, lasciamo il tempo di cambiarsi uscendo momentaneamente dalla cabina e gli facciamo indossare gli occhialini protettivi.

2) A questo punto ci occupiamo di controllare se la peluria nella zona da trattare è stata trattata accorciandola correttamente e di coprire con la matita bianca i nei, tatuaggi, cicatrici, peli incarniti, irritazioni, follicolite, inoltre:
VISO - coprire i bordi delle labbra e i bordi delle sopracciglia con la matita bianca.
PETTO/ADDOME - coprire i capezzoli con la matita bianca e l'ombelico con un dischetto di cotone

3) Una volta appurata la zona, o le zone, che il cliente desidera trattare, posizioniamo il Diodo Laser in modo idoneo. È possibile trattare tutto il corpo.

4) Impostiamo il macchinario in base alla zona da trattare (tipo di pelle e fotosensibilizzazione, zona, e intensità);
Modalità automatica, durante le prime sedute; partiamo con fluenze basse, ed eventualmente aumentiamo sulle gambe e sulle braccia valutando il tipo di carnagione e se c'è forte intensità pilifera.
NB) tot. 6/9 passate per zona
Nel corso della seduta poi si andrà aumentando l'energia, in base alla risposta della zona e alla sensazione del cliente.

5) Esecuzione del trattamento.

6) Rimozione residui di gel e applicazione crema post-epilatoria. Preoccupandosi di pulire bene i segni di matita bianca.

7) Accomiatate il cliente in reception e ricordarsi sempre di fissare l'appuntamento per il mese successivo.

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

LA DOSSIER STATO DI SALUTE

DESCRIZIONE	SI	NO	NOTE
GRAVIDANZA/ALLATTAMENTO		Temporaneo	Una volta terminato OK
PACEMAKER/DISPOSITIVI ELETTRONICI		Permanente	Una volta terminato OK
EPILESSIA		Permanente	Una volta terminato OK
CHEMIO O RADIO TERAPIE		Permanente	Una volta terminato OK
ALLERGIE CUTANEE	OK		Purchè non manifeste nella zona da trattare
MALATTIE DELLA PELLE	OK		Purchè non manifeste nella zona da trattare
PROBLEMI CIRCOLATORI	OK		Attenzione all'assunzione dei farmaci probabilmente fotosensibilizzanti, quindi impostare tecnologia con potenze di partenza più basse.
MALATTIE ORMONALI	OK		Usare potenze di partenza più basse e informare il cliente delle possibilità di risultato meno evidente o meno saturo rispetto ad un corretto stato di salute
OVAIO POLICISTICO	OK		Nel caso di calcoli uterini non si può effettuare il trattamento all'inguine.
DIABETE	OK		Melito: 1 OK Melito: 2 OK Melito: 3 Fare attenzione con le potenze (vedi note Problemi circolatori)
SPIRALE/DIAFRAMMA/PROTESI METALLICHE		Permanente	Nel caso di impianti dentali evitare il baffetto. Spirale e diaframma inerenti all'inguine.
ANTICOAGULANTI/CORTISONE/ANTIBIOTICI	OK		Vedi problemi circolatori

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

IL SOLE E LA PELLE

FOTOTIPO	AZIONE DEL SOLE SULLA PELLE	CARRATTERISTICHE PIGMENTOSE
I	Si scottano facilmente, non si abbronzano mai, si arrossano	Soggetti con lentiggini, capelli rossi, razza celtica
II	Si scottano facilmente, si abbronzano poco	Biondi
III	Si scottano moderatamente si abbronzano progressivamente	Bruni
IV	Si scottano poco, si abbronzano bene	Latini
V	Si scottano raramente sono sempre abbronzati	Arabi, asiatici
VI	Si scottano molto raramente, sono molto pigmentati	Neri

POST TRATTAMENTO

Dopo il trattamento, nel caso vi fosse la comparsa di flogosi, edemi o rossori persistenti apporre una garza bagnata o panno. Nel caso di manifestazioni di arrossamenti persistenti evitare nei giorni successivi bagni caldi, attività aerobica e massaggi.

- Esposizione solare: è consigliato l'utilizzo di un fattore di protezione medio/alto (SPF 30 - SPF 50); evitare di esporre la zona trattata alla luce diretta di lampade e raggi solari nei 1/2 giorni successivi il trattamento, e dei solari. L'immediata esposizione post trattamento potrebbe causare la rigenerazione del pigmento, con conseguente iperpigmentazione.
- Ritardanti della crescita: è consigliato l'utilizzo dei ritardanti della crescita, per favorire le fasi chimiche del pelo e per mantenere la zona da trattare sempre idratata.
- Trucco: è possibile applicare del trucco il giorno successivo al trattamento se non sono presenti bolle o ispessimenti cornei poiché in tale fase la cute risulta sensibile pertanto meglio evitare sfregamenti e infezioni da trucco.

CONTROLLI TECNICI

- Tra una seduta e l'altra il lasso di tempo deve intercorrere tra i 30/40 giorni.
- Tra una seduta e l'altra si consiglia di far effettuare una piccola ceretta di controllo; entro le prime 3/4 sedute, tale ceretta risulta facoltativa; dalla 4/5 seduta si chiede al cliente di effettuare una ceretta di controllo per verificare la reale produttività dei siti attivi.

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

RESA ORARIA E TEMPISTICHE

Di seguito vengono illustrate le varie tempistiche di trattamento al fine di agevolare la corretta presa di appuntamento sul planning.

ZONA INTERESSATA	MINUTI	PREZZO €
Baffetto/Labbro	1	15
Mento	2	15
Viso Completo	5	35
Viso Laterale	2	20
Ascelle 2	3/4	25
Braccia 2	15	45
Petto	15	45
Schiena	15	45
Addome	15	45
Lombari	5/8	25
Inguine Completo	5/8	25
Mezza Gamba 2	8/10	50
Gamba Intera 2	20	25+25=50
	25/30	45+45=90

Note:

- Per la prima giornata laser si consiglia di fare arrivare il cliente 10 minuti prima dell'orario dell'appuntamento per consentire al consulente di illustrare brevemente le caratteristiche del trattamento e guidare il cliente nella compilazione del consenso informato e della scheda personale.

SUO DIRITTO RICEVERE INFORMAZIONI, NOSTRO DOVERE INFORMARLO

- Previa telefonata, ricordare sempre al cliente di accorciare preventivamente il pelo, facendo attenzione a non tagliarsi o irritare eccessivamente l'epidermide.

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

CLASSIFICAZIONE DEI FOTOTIPI

	I	II	III	IV	V	VI
CAPELLI	Rossi, Biondi	Rossi, Biondi, Castano, Chiaro	Castano, Biondo scuro	Castano Scuro	Castano Scuro	Neri
OCCHI	Blu, Grigi, Verdi	Blu, Grigi, Verdi, Nocciola	Marroni, Blu, Grigi, Verdi Nocciola	Marroni	Marroni	Marroni
PELLE	Molto pallida, Rossiccia	Pallida	Bianca, leggermente Scura	Leggermente scura	Leggermente scura	Nera
REAZIONE AL SOLE	Si scotta facilmente non si abbronzava mai	Si scotta facilmente si abbronzava molto poco	A volte si scotta si abbronzava gradualmente	Si abbronzava facilmente	Si abbronzava facilmente e diventa scura	Si abbronzava facilmente e diventa molto scura

LE CARATTERISTICHE DEI FOTOTIPI

	I	II	III	IV	V	VI
CAPELLI	Rossi	Biondo chiaro o scuro	Biondo scuro o castano	Castano	Castano	Castano Neri
PELLE (in inverno)	Bianca	Chiara	Chiara	Olivastra	Scura	Scura
LENTIGGINI	Molte	Alcune	Poche			
SCOTTATURE	Sempre	Molto spesso	Spesso	A volte		
ABBRONZATURA	Molto leggera	Leggera	Leggera media	Scura	Scura	Scura
CAPACITA' DI ABBROZZARSI	Molto difficile	Difficile	Abbastanza facile	Facile	Molto facile	Molto facile

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

F.A.Q. : Domande frequenti

ISTITUTO DI ESTETICA:

1. Il mio centro Estetico può usare questa tecnologia?

Si, il diodo Laser 808 nm estetico è certificato ed autorizzato dal Decreto Ministeriale nr. 110 del 12/05/2011, Scheda Tecnico Informativa 21b.

2. E' possibile acquistarlo?

Si, in qualsiasi momento.

3. Quanto dura il manipolo?

Il manipolo viene garantito 10 milioni di spot.

4. Esistono obblighi o vincoli?

No, alcuno. Vigè il concetto della "Reciproca soddisfazione"

CONSUMER:

1. Questo trattamento è davvero indolore?

Il diodo Laser essendo una luce selettiva coerente genera la sua azione solo sul pelo rendendo impercettibili gli effetti collaterali sulla pelle.

2. È davvero efficace e permanente?

Il trattamento è davvero efficace poiché porta ad un'importante diradamento del patrimonio pilifero ma in assoluto è impossibile garantire la durata definitiva a vita.

3. Funziona anche su pelli scure?

Si, la frequenza di 808 nm viene assorbita da pigmenti quali: emoglobina, melanina e keratina. In questo il colore della pelle non interferisce sul trattamento.

4. Ci sono effetti collaterali?

Gli effetti collaterali sono minimi e praticamente inesistenti nella maggior parte dei casi, attraverso l'anamnesi iniziale si identificano i possibili effetti collaterali minimi.

5. Questo trattamento può creare ustioni?

Il raggio laser essendo un'onda elettromagnetica a bassa intensità se usato correttamente non provoca ustioni.

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

F.A.Q. : Domande frequenti

6. Si può trattare il pelo biondo?

Si, è normale attendersi una risposta al trattamento più lenta.

7. Si può trattare il pelo bianco?

No, il pelo bianco e grigio non è indicato al trattamento poiché non contiene alcun pigmento.

8. Quante sedute dovrò fare?

Il numero di sedute varia a seconda dei casi, ed è soggetto a: età, colore del pelo, produzione ormonale, stato di salute ed altri fattori personali. Statisticamente il numero di sedute è tra le 10 e le 15.

9. Ogni quanto devo sottopormi al trattamento?

Si consiglia una frequenza mensile (30/40 gg).

10. Quanto dura la seduta?

La durata della seduta varia in funzione della zona da trattare. Esempio: baffetto 1 min; entrambe le ascelle 5/7 min; gambe intere 25/30 min.

11. Gli uomini possono fare la foto epilazione?

Si, è assolutamente consigliato essendo un tipo di pelo normalmente più indicato, dato lo spessore e la densità dei pigmenti e dei bulbi.

12. Da che età si può cominciare a fare?

Possono eseguire il trattamento i soggetti dalla fase di sviluppo in poi. Per i minori è richiesto il consenso dei genitori.

13. Le donne in gravidanza possono effettuare il trattamento?

No, si deve attendere la fine dello svezzamento.

14. Posso effettuare il trattamento in presenza di patologie?

Dipende dalla patologia e dal grado.

15. In presenza di nei si può effettuare il trattamento?


Si, i nei vengono coperti molto bene con un correttore bianco.

16. Il trattamento può essere effettuato in qualsiasi parte del corpo?

Si, tranne cuoio capelluto, orifizi, zona perioculare e mucose.

17. In presenza di tatuaggi si può effettuare il trattamento?

No, i tatuaggi vanno coperti molto bene e la zona tatuata non si può assolutamente trattare.

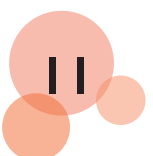

Beauty Service

Metodi e Tecnologie per i Centri Estetici

MANOVRE DI UTILIZZO


Dividiamo la zona da trattare in piccole zone e passiamo con il manipolo perfettamente posizionato sulla zona da epilare con movimenti orizzontali, verticali e circolari. Quindi ogni zona sarà passata per 3 volte.

Metodo di manovra


Fase 1



Fase 2

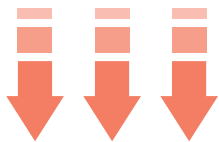

Fase 3

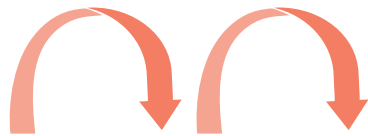

N.B.
Le 3 fasi sono
intercambiabili
fra loro.

INTERVALLI E TEMPI DEL TRATTAMENTO

AREE	INTERVALLO FRA I TRATTAMENTI	TEMPO DI OGNI TRATTAMENTO
Ascella	20 giorni	3 - 4 minuti
Braccia	20 giorni	3 - 5 minuti
Gambe	20 giorni	4 - 6 minuti
Inguine	20 giorni	4 - 6 minuti

Durante il trattamento, il cristallo guida deve essere posizionato ermeticamente sulla pelle in modo da permettere all'emoglobina di assorbire l'energia luminosa. Riepilogo per depilazione laser:

- Se il follicolo pilifero è più profondo, la durata dell'impulso deve essere più lunga.
- Se il follicolo pilifero è meno profondo, la durata dell'impulso deve essere più corta.
- Se il pelo è più spesso, la durata dell'impulso deve essere più lunga e l'energia dovrebbe essere inferiore.
- Se il pelo è più sottile, la durata dell'impulso dovrebbe essere ridotta e l'energia dovrebbe essere superiore.
- Se il pelo è più scuro, la durata dell'impulso deve essere più lunga e l'energia dovrebbe essere inferiore.
- Quando la regolazione dei parametri è terminata, è possibile premere "READY" e iniziare il trattamento.

Avviso: Tutti i parametri non possono essere regolati sotto lo stato "READY".